




LIQUIDO AMNIOTICO

- EN LAS MUESTRAS DE **LIQUIDO AMNIÓTICO** SE UTILIZA FALCÓN CON TAPÓN SIN VENTILACIÓN.
- TANTO LA PEGATINA DE PETICIÓN COMO EL NOMBRE/APELLIDOS DE LA PACIENTE DEBEN COLOCARSE EN EL LATERAL DEL FALCÓN.
- LA PEGATINA PREFERENTEMENTE EN EL LADO DONDE FIGURA EL RECUADRO TRANSLUCIDO.

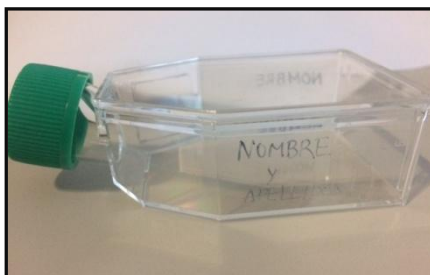

- LA BOCA DEL FALCÓN MIRANDO HACIA ARRIBA.
- ACOMPAÑADO DEL **VOLANTE DE CITOGENÉTICA o PETICIÓN ELECTRÓNICA**: INDICACIÓN O MOTIVO DE LA PRUEBA INVASIVA, FUR, SEMANAS DE GESTACIÓN.
- ❖ MANDARLO AL LABORATORIO LO MÁS RÁPIDO POSIBLE A TEMPERATURA AMBIENTE Y PROTEGIDO, SIEMPRE EN EL DÍA DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA.

 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS GERENCIA ÁREA SANITARIA IV HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS	INSTRUCCIONES CONTENEDOR MUESTRAS PRENATAL	PR-CGM-22
		ED 06
LABORATORIO GENÉTICA-ÁREA DE CITOGENÉTICA		

VELLOSIDAD CORIAL

- EN EL CASO DE LA **VELLOSIDAD CORIAL** SE DEBE SOLICITAR EL CONTENEDOR AL LABORATORIO DE CITOGENÉTICA (985108095 ext. 38095).
 - **HUCA:** AVISAR UNOS DÍAS ANTES O AL MENOS UNA HORA ANTES DEL PROCESO INVASIVO PARA PODER ATEMPERAR EL MEDIO.
 - **OTROS HOSPITALES:** AVISAR UNOS DIAS ANTES PARA PODER REALIZAR EL ENVIO DEL CONTENEDOR EL DIA PREVIO A LA PRUEBA INVASIVA.
- EL CONTENEDOR (TUBO ESTÉRIL DE BOCA ANCHA) de la vellosidad corial TIENE MEDIO DE TRANSPORTE CON ANTIBIÓTICO PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN.
- ATEMPERADO A 37°C.
- SE DEBE ROTULAR CON LOS DATOS DE LA PACIENTE o LA PEGATINA DE LA PETICIÓN.
- SIEMPRE ENVIAR CON DE UNA MUESTRA DE **SANGRE PERIFERICA DE LA GESTANTE EN EDTA**, TUBO MORADO DE 4 mL (HEMOGRAMA)
- ACOMPAÑADO DEL **VOLANTE DE CITOGENÉTICA o PETICIÓN ELECTRÓNICA:** INDICACIÓN O MOTIVO DE LA PRUEBA INVASIVA, FUR, SEMANAS DE GESTACIÓN.
- ❖ MANDARLO AL LABORATORIO LO MÁS RÁPIDO POSIBLE A TEMPERATURA AMBIENTE Y PROTEGIDO, SIEMPRE EN EL DÍA DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA.



 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS GERENCIA ÁREA SANITARIA IV HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS	INSTRUCCIONES CONTENEDOR MUESTRAS PRENATAL	PR-CGM-22
		ED 06
LABORATORIO GENÉTICA-ÁREA DE CITOGENÉTICA		

TEJIDO SOLIDO

- ⊙ La muestra fetal debe ser una **biopsia de piel de zona no pilosa**, que incluya dermis y fascia, zona de las nalgas.
- ⊙ También puede extraerse una muestra de sangre (**sangre de cordón, punción intracardiaca**) anotando el tipo de muestra en el envío.

- ⊙ EL CONTENEDOR (TUBO/BOTE ESTÉRIL DE BOCA ANCHA) EN SUERO FISIOLÓGICO.

“Las muestras para estudio citogenético nunca pueden venir en formol”

- ⊙ ATEMPERADO A 37°C
- ⊙ SE DEBE ROTULAR CON LOS DATOS DE LA PACIENTE o LA PEGATINA DE LA PETICIÓN.
- ⊙ SIEMPRE SÍ ES POSIBLE ENVIAR CON DE UNA MUESTRA DE SANGRE PERIFÉRICA DE LA GESTANTE EN EDTA, TUBO MORADO DE 4 mL (HEMOGRAMA)
- ⊙ ACOMPAÑADO DEL VOLANTE DE CITOGENÉTICA o PETICIÓN ELECTRÓNICA: INDICACIÓN O CAUSA DE LA PÉRDIDA FETAL, FUR, SEMANAS DE GESTACIÓN.
- ⊙ CONSENTIMIENTO INFORMADO DEBE QUEDAR EN LA HISTORIA CLÍNICA DE LA GESTANTE.

❖ MANDARLO AL LABORATORIO LO MÁS RÁPIDO POSIBLE A TEMPERATURA AMBIENTE Y PROTEGIDO.

❖ Cuando se obtiene la muestra en fin de semana o festivo guardarla en nevera a 4°C hasta el envío, que se realiza a temperatura ambiente.